



## ПОРТАТИВНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ

# VERT-1 A



Тверская обл. город Торжок  
Калининское шоссе 14

✉ Russia, Tver region, Torzhok town,  
Kalinskoe highway 14

8(48251)9-24-54  
8(48251)9-69-54

☎ +7-48251-9-24-54  
+7-48251-9-69-54

8(915)728-88-77  
8(915)728-88-66

☎ +7-915-728-88-77  
+7-915-728-88-66

www.ТИФЛОЦЕНТР.рф



www.TIFLOCENTRE.LU

e-mail: vert@bk.ru



e-mail: vert@bk.ru



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Комплектация:

Индукционная петля VERT-1 (портативная) - 1 шт  
Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт

Паспорт изделия - 1 шт

Коробка - 1 шт

Пиктограммы доступности помещения - 2 шт

ТИФЛО ЦЕНТР  
Вертикаль





**Назначение:**

Индукционная петля VERT-1 предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а так же наличия посторонних звуков или прерывады между собеседниками. Количество берется из расчета 1 шт. на одно рабочее место.

**Использование:**

Для использования устройства на рабочем месте необходимо установить его таким образом, чтобы пиктограмма была обращена в сторону слабослышащего. Индукционная петля VERT-1 представляет заводом изготовителем настроенной и полностью готовой к работе. Для включения и использования достаточно нажать зеленую кнопку расположенную в верхней части корпуса. Светодиод светодиод символизирует о готовности системы к работе, а мерцание индикатора оранжевыми цветом означает трансляцию сигнала индукционной рамкой. Для отключения устройства необходимо нажать и удерживать красную кнопку.

Слабослышащему необходимо переключить свой слуховой аппарат в режим индукционной катушки (Т).

Устройство оборудовано встроенным аккумулятором, который позволяет использовать его без подзарядки в течение 4х часов. Для полной зарядки аккумулятора необходимо подключить поставляемое в комплекте зарядное устройство в на срок не менее 16 часов.

**Основные преимущества:**

Тщательно отстроенная электроника позволяет использовать эту систему без какой-либо настройки. Высокочувствительный встроенный микрофон позволяет сразу несколькими пользователями с нарушением слуха одновременно общаться.

**Дополнительно:**

Дополнительно, по запросу, модель VERT-1(plus) может оснащаться 3,5 мм гнездом для подключения микрофона, для подключения внешнего источника звука и внешнего индукционного контура. Внимание, внешний индукционный контур должен иметь сопротивление в диапазоне 0,8-1,8 Ом, а комплексный импеданс не выше 3 Ом, 1 кГц.

**Эксплуатация:**

Система VERT-1 предназначена для использования только внутри помещений. Не вскрывайте корпус устройства т.к. это может повредить индукционную систему и лишает вас гарантии на ремонт. Устройство не содержит элементов и деталей предназначенных для самостоятельного обслуживания. Изделие VERT-1 содержит никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи, которые необходимо утилизировать в установленном в РФ порядке. Для очистки корпуса от загрязнений используйте мягкую ткань и изопропиловый спирт.

**Технические характеристики:**

Габаритный размер: 230мм x 330мм x 30мм  
Материал корпуса: ABS пластик  
Чувствительность микрофона: -60+-3 дБ  
Максимальная выходная мощность: 7 Вт  
Степень защиты: IP X0  
Диапазон рабочих температур: 0-40 С  
Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С  
Блоки питания: встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В.  
Внешний блок питания AC 220 - DC 15, 1 А  
Площадь покрытия: 1,2 м<sup>2</sup> в рабочем диапазоне 1кГц.

**Условия гарантии :**

1. Гарантия качество запчастей поставляемого товара действительна в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-сдачи или накладной ТОРГ-12.
2. В случае доставки по России гарантия действительно со дня получения товара на складе транспортной компании.
3. Гарантия распространяется на недостатки (неисправности) изделия выданные дефектами производителя. В гарантийные обязательства Продавца не входят расходы на работы по снятию и установке запасных частей и расходы на доставку бракованных деталей до склада Продавца.
4. Продавец обязан поменять бракованные детали на новые и выслать клиенту в сроки, не позднее 30-х рабочих дней со дня получения. Отправка транспортной компанией за счет покупателя.
5. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:
  - Механического повреждения изделия в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы, в том числе на изделия доставленные транспортной компанией без жесткой упаковки;
  - Действия непреодолимой силы (пожар, резкий перепад напряжения источника подачи электроэнергии.);
  - Не правильное техническое обслуживание;
  - Несанкционированная модификация или неправильное использование;

**Свидетельство о приемке:**

Серийный номер изделия :

99999999

**Изделие признано годным к эксплуатации.**

Дата изготовления « 14 - 11 / 11 » 20 г. подпись М.П.

Фамилия и должность осуществлявшего приемку: Кудрявцева Дюнова Н.А.

**Сведения о продавце:**

Дата продажи « 14 - 11 / 2012 » г. подпись М.П.

